




TUTORIAL D'APPLICATION -MICRO-TENONS FASCICULES BIOLIGHT PLUS

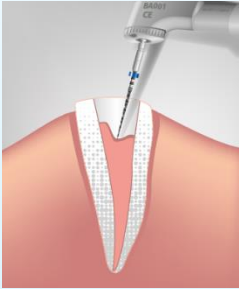


1- Désobturer partiellement le canal.

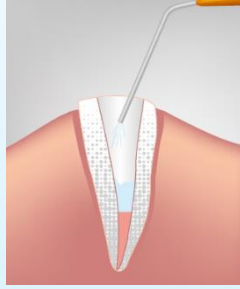


2- Rincer et sécher.

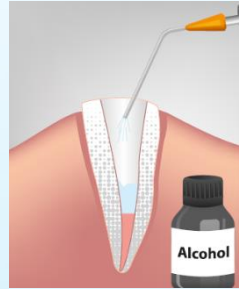


3- Désinfecter à l'alcool et sécher.

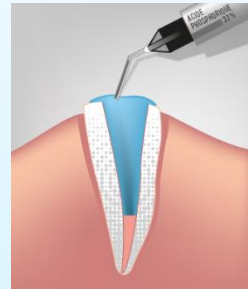


4- Mordancer, rincer et sécher.

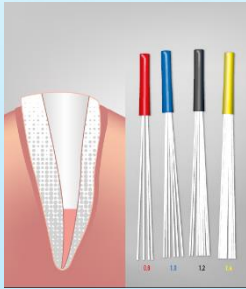

5- Sélectionner les micro-tenons fasciculés.

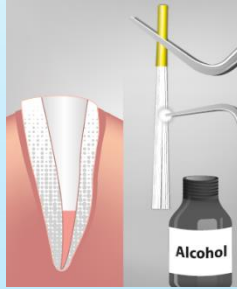

6- Désinfecter et sécher les tenons fasciculés à l'alcool.

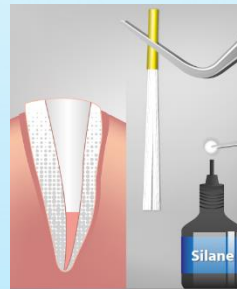


7- Silaner puis sécher les micro-tenons.



8- Appliquer un adhésif auto-mordant à prise duale, puis sécher.




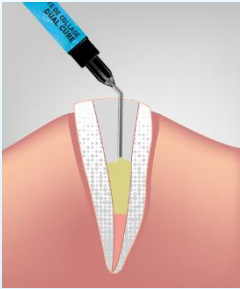


9- Remplir le canal de colle composite **fluide** à prise duale.




10- Enduire les micro-tenons de colle composite fluide.

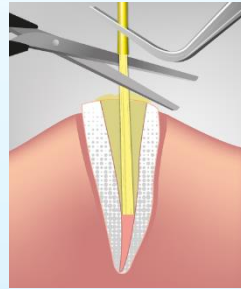


11- Insérer les Biolight PLUS, les maintenir en pression et les couper.

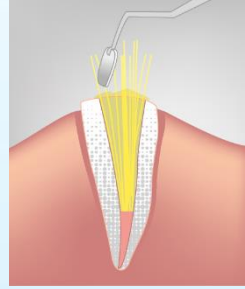


12- Réorganiser les micro-tenons latéralement et axialement.

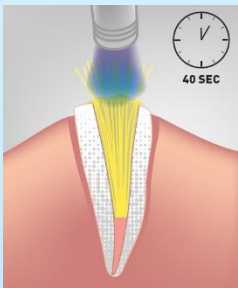


13- Photopolymériser.

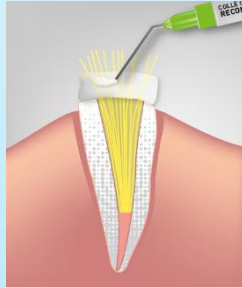

14- Ajouter de la colle de reconstitution.

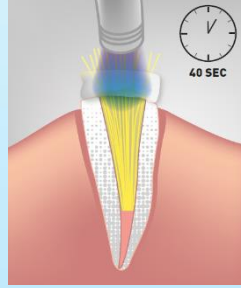

15- Photopolymériser.

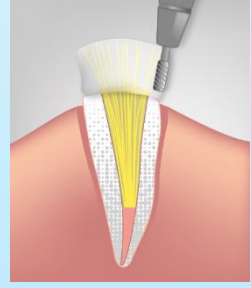

16- Reconstituer un faux-moignon selon les règles de l'art.

Dispositif médical pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursé par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Classe IIA (marquage CE délivré par SGS) CE0120

